

OnyxInterface Software




Einleitung

Diese Software macht es möglich, exportierte Scan-dateien wie STL- oder OBJ-Dateien automatisch in OnyxCeph™ zu importieren.


Vorbereitung

Damit es funktioniert muss folgendes vor der Installation von OnyxInterface gemacht werden:

- Erstellen Sie einen Ordner wo die exportierte Dateien (STL oder OBJ) gespeichert werden sollen. Sie brauchen Netzwerk-Zugriff auf diesem Ordner. Zum Beispiel: S:\Meditscan
- Die exportierte Dateien (STL oder OBJ) werden dort in einem Unterordner gespeichert. Die Einstellung dazu wird im Scanprogramm (z.b. Medit) unter Exportoptionen eingestellt (**2** Export File To)

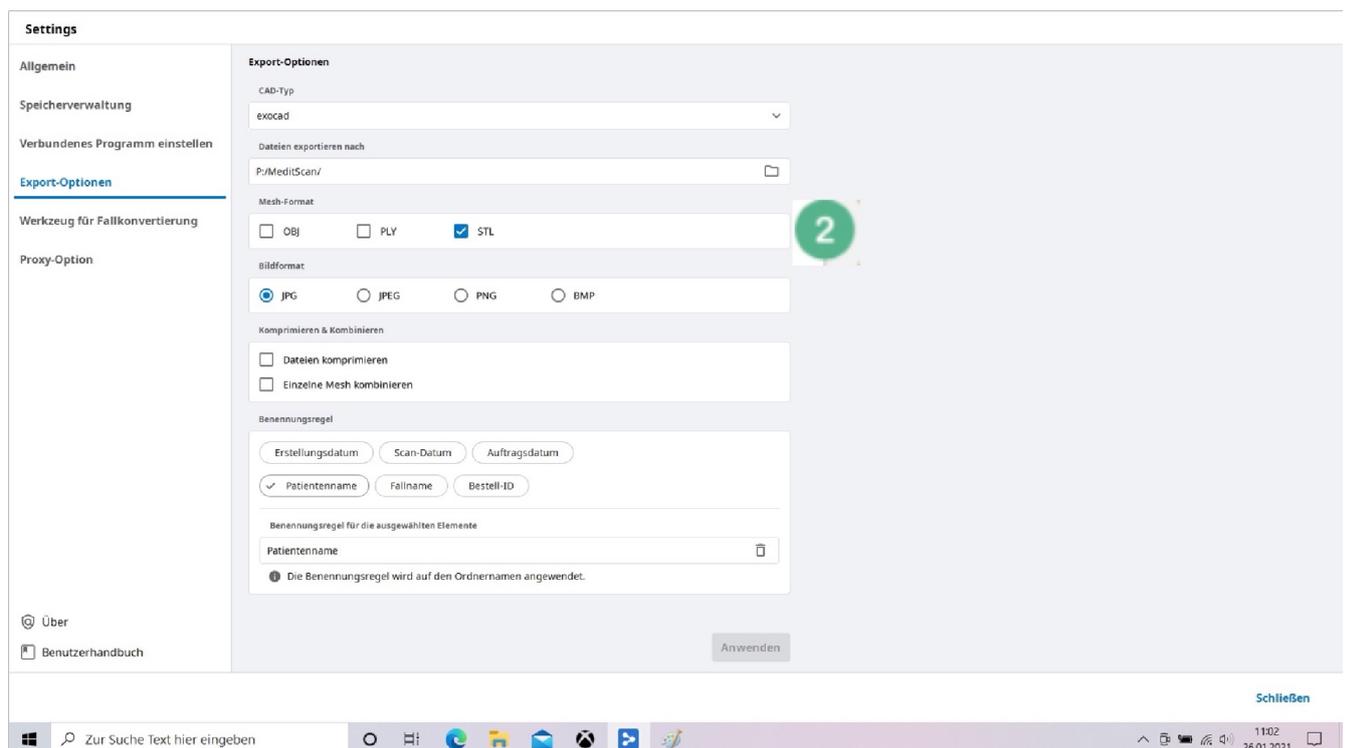


**Wichtig: Der Unterordner soll als Name haben: Ihr Patientenummer.
Zum Beispiel: S:\Meditscan\5909**


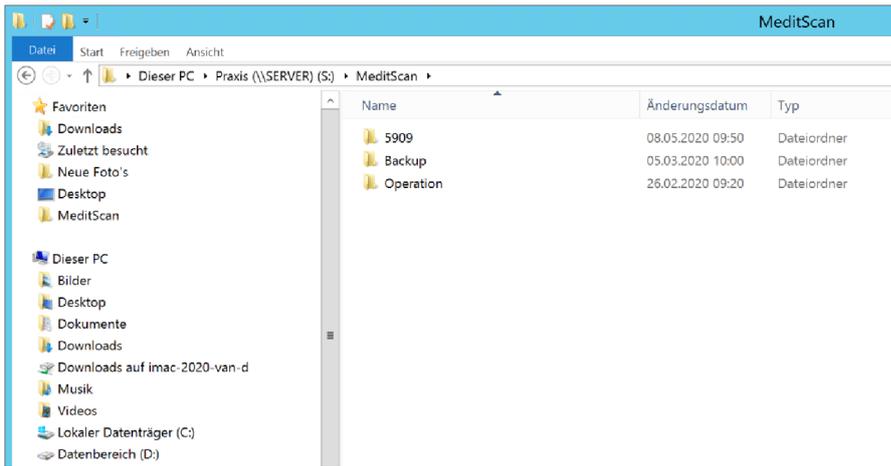


Installation


- Starten Sie die Installation mit dem Programm: SetupOnyxInterface.exe
- Wählen Sie die Installationsmodus. Normalerweise sollte das Programm nur ein Mal (im Hintergrund) laufen, also nur bei einem User.

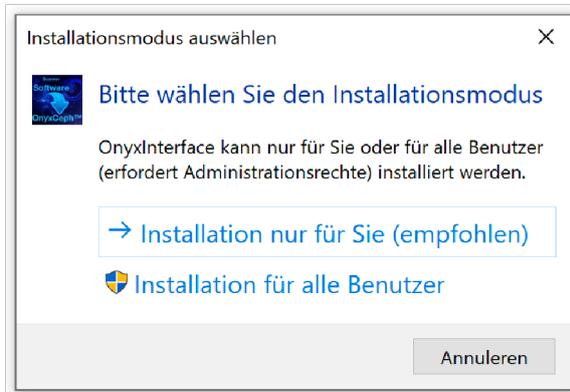


- Folgen Sie die Anweisungen von Setup:

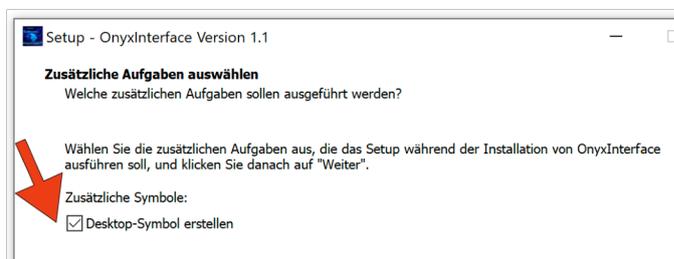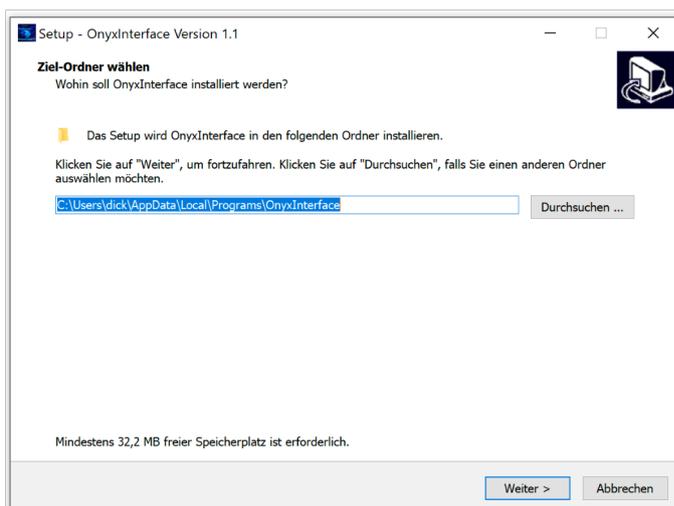

- Desktop-Symbol erstellen ist zu empfehlen, damit das Programm leichter finden und zu starten ist.
- Danach auf Installieren klicken.

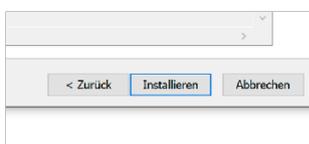


- Lassen Sie bitte die Option „OnyxInterface starten“ aktiv, damit das Programm OnyxInterface konfiguriert werden kann .

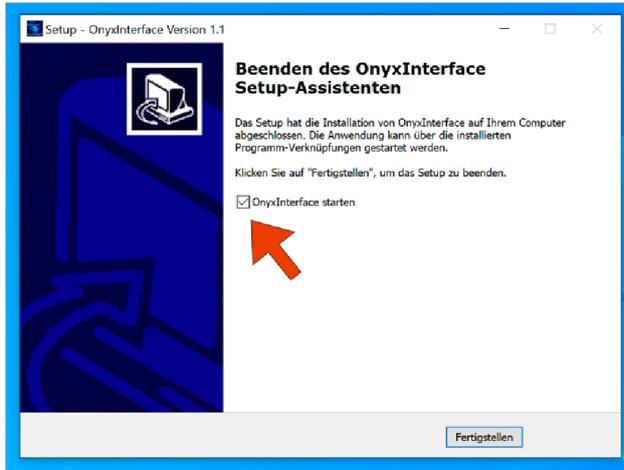

Konfiguration

Nach Fertigstellung von Setup, wird die Konfiguration gestartet:

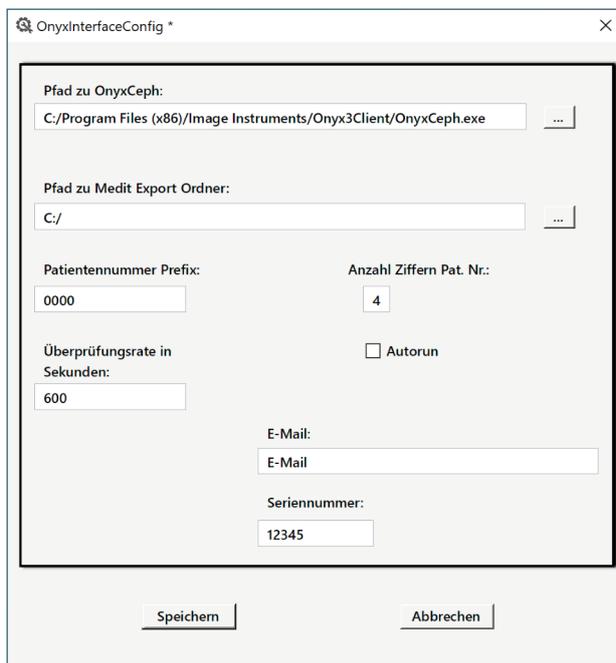

Hier sind wichtige Einstellungen zu machen, damit das Programm nachher funktioniert.

- Wo befindet sich der Ordner Onyx3Client?
- Wo befindet sich der Ordner, wo die Export-Dateien abgelegt werden? (Siehe Vorbereitung, zum Beispiel:)

Pfad zu Medit Export Ordner:


Z:/MeditScan

- Prefix Patientennummer:




Wie Sie hier sehen, gibt es vor der Patientennummer 5909 die 0000 (vier mal null). Also sollte man hier dann auch 0000 eintragen.


- Aus wieviel Ziffern besteht die Patientennummer?
Wir haben in diesem Beispiel vier Ziffern z.B. 5909.
- Autorun: Wenn Sie einen Link in Windows Autostart eintragen, kann das Programm direkt starten mit Autorun. Sonst müssen Sie zum Starten auf „Start“ klicken.
- Überprüfungsrate in sekunden: Wie oft soll das Programm prüfen, ob es eine neue Export-Mappe mit Dateien gibt? Zum Beispiel: Alle 2 Minuten = 120 Sekunden.
- Lizenz: Geben Sie bitte Ihre E-Mail Adresse und die dazu gehörende Seriennummer ein.
- Speichern Sie bitte die Einstellungen. Wenn diese erfolgreich gespeichert wurden, können Sie die Konfiguration Beenden.

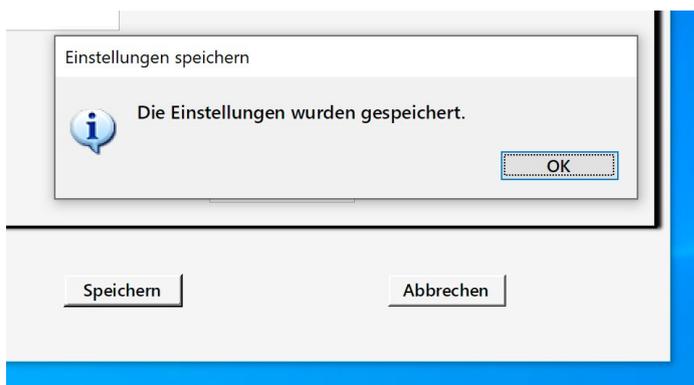

>>

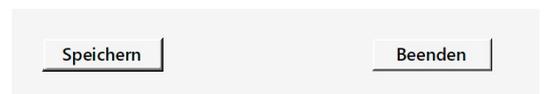


OnyxInterface starten

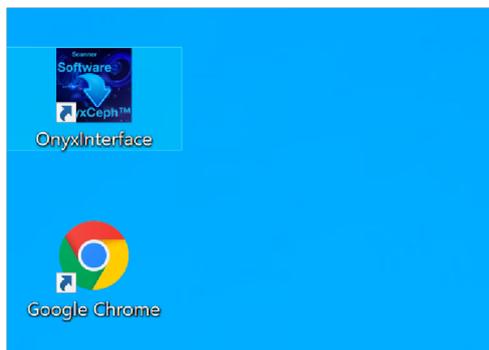


- Starten Sie das Programm mit der Verknüpfung auf dem Desktop.

Mittels „Start“ wird die Importfunktion im Hintergrund gestartet. Mittels „Stop“ wird diese beendet.

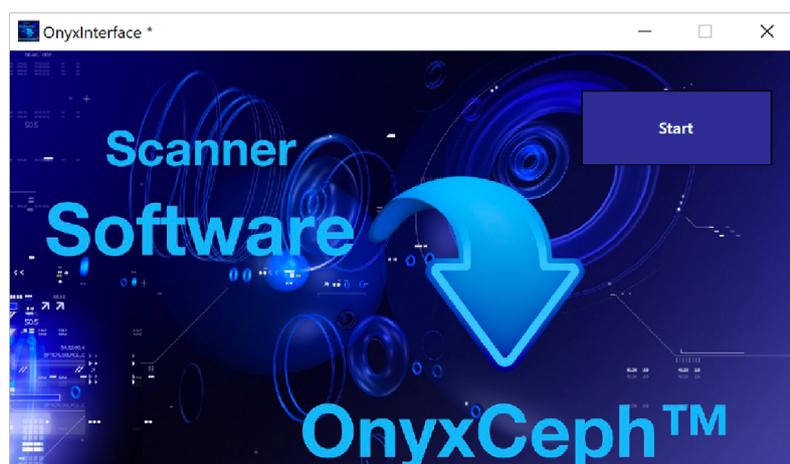

Um Das Programm zu verlassen, klicken Sie bitte auf dem Kreuz rechts oben:

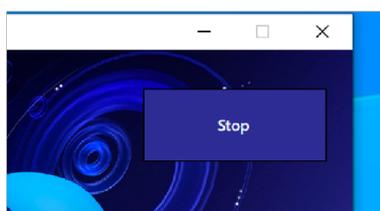

Viel Erfolg!

Drs. Dick Beugeling,
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie.
E-Mail: mail@beugeling.net